

# 無臭スケール除去剤

液体タイプ

# クリーンCL


## 透析機器洗浄剤(炭酸カルシウム除去)

### 特徴

従来使用されている酸洗浄用薬剤が抱える問題点(人体・下水道への排水でのBOD負荷・使用部品の各種材料等への影響及び強烈な刺激臭)をすべて解決した極めて安全な酸洗浄剤です。

### ◆濃度とpHの関係


クリーンCLは従来使用されている酢酸より低い濃度で効果が得られます。

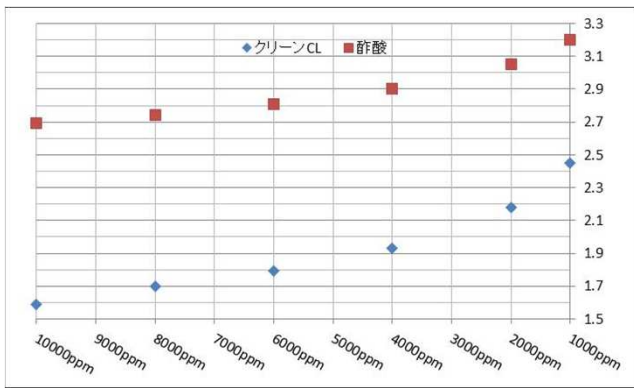

### ◆炭酸カルシウム溶解能力試験

<実験の条件>

各濃度の薬液を100mlのビーカーに調製し、その中に炭酸カルシウム1.00gを加え1時間攪拌後ろ過、乾燥し溶解量を算出した。

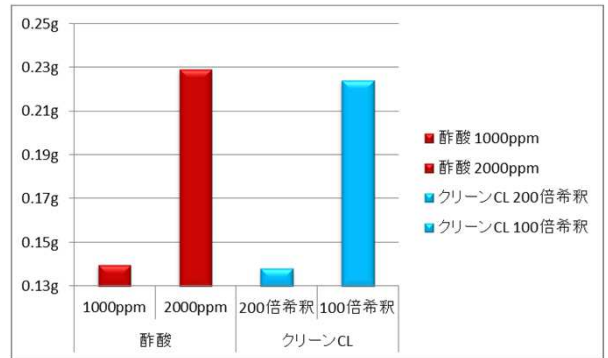

### ◆使用方法

- ◎ 100～200倍に希釈してご使用ください
- ◎ 標準使用回数は週2回をご推奨いたします
- ◎ 貯留の場合、40分以上接触させてください

### ◆一般的性質

外観 無臭の白色液体  
 pH 100倍希釈液..... 2.45±0.05  
 50倍希釈液..... 2.35±0.05  
 BOD 100倍希釈液..... 99mg/l  
 COD 100倍希釈液..... 131mg/l

内容	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	PH
洗浄後水洗(5分後)	6.0	6.7	4.30
洗浄後水洗(10分後)	0.1以下	5.0	6.70
洗浄後水洗(30分後)	0.1以下	0.1以下	7.02

### ◆成分

- ◎ カルボン酸化合物
- ◎ アミドサルファ化合物
- ◎ ジアゾリン系防黴剤

**塩素系の製品と一緒に混ぜると塩素ガスが出て危険です！！**

### ◆使用上の注意

- ◎ 本剤と次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ性剤とは絶対に混合しないで下さい
- ◎ 本剤を扱う時は、保護メガネ・手袋を着用して下さい
- ◎ 眼や口に入らないように注意して下さい。万一眼に入った場合は、直ちに流水で十分に洗眼し、医師の適切な処置を受けて下さい。又、誤って口に入った時は、よくうがいをして医師の適切な処置を受けて下さい
- ◎ 皮膚や衣類その他に付いた時は、よく水洗して下さい

### ◆保管上の注意

- ◎ 冷暗所に保管して下さい。
- ◎ 直射日光、日なた、窓際などの所に置かないで下さい。

### ◆品質保証期間

- ◎ 1年

### ◆荷姿

- ◎ 9ℓ×2箱/1ケース(リキッドタイプ)

【製造販売元】

株式会社 エーエヌ・テック

〒521-1114 滋賀県彦根市彦富町931-5

TEL:0749-43-8017

FAX:0749-43-3021

**まぜるな！危険！！**

**強酸性**