

# 医療機器用外観クリーナー

## AN-700

新発売！！  
ノロウイルスにも有効

### 特徴

- ・速効性のある消毒剤を配合しています。
- ・次亜塩素酸ナトリウムを使用していないため部材腐食性、安全性に優ります。
- ・大腸菌に対して、次亜塩素酸ナトリウムに比べて80倍の即効性があります。
- ・界面活性剤を含有しているため、汚れ落としの効果もあります。
- ・爽やかなスカッシュの香りに仕上げました。

### 対象となる用途

- ・医療機器の外観清掃および消毒
- ・シーツ等、ベッド周りの消毒

人工透析装置(コンソール)等の  
外観清掃及び消毒におすすめです

定番品:スカッシュタイプ  
香りのカスタマイズを賜ります。  
レモン、ジャスミン、シトラスから  
ご指定ください。  
無香料も賜ります。

### 使用方法

- ・本剤を機器に直接噴霧し、拭きとるかまたは、本剤を布に塗布し、塗布面で機器を拭いてください。
- ・機器に噴霧後、一定時間(15-60秒)経過後に拭き取るのが効果的です。

### 使用上及び保管上の注意

- ・人体に向けて噴霧しないでください。
- ・作業時には、マスク、手袋を着用してください。
- ・棚の中等、光が当たらない暗所に保管してください。

### 成分


- ・塩素化イソシアヌル酸塩
- ・香料
- ・界面活性剤
- ・キレート剤

### 物性

・pH 6.55±0.2

### 消毒効果試験

- ・大腸菌に対する試験
- ・コロニー発生で赤く発色

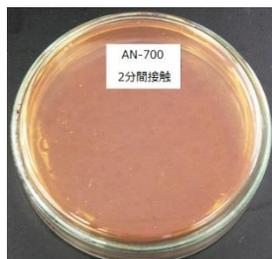

コントロールは、コロニーが発現し赤く発色。(+)  
AN-700に接触させるとコロニーの発現が無い。(一)

### 《荷姿》

250ml(スプレーガン付き)

詰替え用

1ℓ/本

5ℓ/本

10ℓ/ケース



### 【販売代理店】

#### 【製造販売元】

株式会社 エーエヌ・テック

〒521-1114

滋賀県彦根市彦富町931-5

TEL: 0749-43-8017

FAX: 0749-43-3021