

無臭性除錆剤 【AN-5P】

☆透析機器、手術用器具、
鉗子等の洗浄に効果！
☆器具、機器が長持ちコストダウン！
☆安全・簡単！！

新発売



《 特徴 》

- ◎ 有機酸塩を主成分とする除錆剤でスケール洗浄にも効果を発します。
- ◎ 臭気がなく、ステンレスに対する腐食が少なく、金属への安全性・取り扱い性に優れます。
- ◎ 界面活性剤を含有しないため ETRF 等の取りはずしがなく手間がかかりません。

《 主成分 》

- ・ 酸アミン塩
- ・ 安定化剤
- ・ 精製水

《 性状 》

- ・ 外 観 無色透明
- ・ 比 重(20℃)1.25±0.05
- ・ pH(原液) 6.5±0.5

【錆びた鉄板を用いた除錆試験】

試験方法:AN-5Pの20倍希釈液に錆びた鉄板を半分程度浸漬し、1時間取り出し観察を行った。



《 使用方法 》

- ・ RO水を用いて10倍～20倍希釈に調製(供給装置の最小希釈倍率)
- ・ 透析装置の配管・パイプ・ポンプ・シリコンホース内に一昼夜浸漬します。
- ・ 貯留後、2時間水洗する
- ・ 排水ラインから流れた水洗水のpHがRO精製装置～供給装置間のRO水と同じになればAN-5Pの成分はすべて残留は無きものと判定します。
- ・ 洗浄後は必ず消毒(塩素系・過酢酸系)を行って下さい。

《 使用上の注意 》

- ・ 「AN-5P」は直接手に触れても危険はありませんが、取扱いについては眼・皮膚等に付着しないように適切な保護具を着用し作業を行って下さい。付着した場合は石鹼・水等で十分に洗浄して下さい。
- ・ 「AN-5P」は直射日光を避け密封して冷暗所に保管して下さい。
- ・ 亜鉛・亜鉛ダイキャスト・亜鉛メッキ等には、悪影響を及ぼすため使用することは出来ません。
- ・ クロームメッキ等については、10分以上の浸漬を行うとメッキ表面が黒ずんで変色する場合があるので浸漬時間を5分以内で洗浄します。

《 荷姿 》 1kg/ポリ容器、5kg/ポリ容器、9kg/箱

販売代理店：

製造元： 株式会社 エーエヌ・テック

滋賀県彦根市彦富町931-5
TEL:0749-43-8017/FAX:0749-43-3021